## 試劑使用說明:



步驟一:備妥試劑及生化採血器



步驟二:以生化管抽血5cc,取出快篩試劑



步驟三:以拋棄式滴管取出血液滴於試劑檢驗孔內, 等待15-20分後看結果

步驟四:查看快篩結果

陰性結果:結果視窗中只有 C 的位置出現一條有顏色的線。



**陽性結果**:結果視窗中出現兩條有顏色的線("T"線與"C"線),不論哪條線先出現,都是陽性結果。





無效結果:檢驗進行後,結果視窗看不到任何色帶,此為無效結果。可能原因為操作 未正確遵照產品說明書,或檢驗器材品質惡化了。建議重新檢驗該檢體。



